



Aurum[®] Xtra "rett i do"

En unik stomipose der både plate og innerpose kan kastes «rett i do».

Stomiposen gir stor frihet og er tidsbesparende.

Hudplaten er Aurum, og kjent for sin hudvennlighet på grunn av sitt innhold av manuka honning.

Aurum[®] Xtra fjernes raskt og enkelt ved å spyle den innerste posen i toalettet. Se under for fremgangsmåte:

Steg 1



Ta av den ytterste posen og kast i avfallet

Steg 2



Kast den innerste posen i toalettet

Du kan også velge å separere den innerste posen fra platen. Valget er ditt!

Steg 1



Ta av den ytterste posen og kast i avfallet

Steg 2



Kast den innerste posen (uten platen) i toalettet

Steg 3



Kast platen i avfallet


Skyll platen ned i toalettet

Aurum[®] Xtra "Rett i do" poser


Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
851929	XMHFS519	30	S 60ml	8< 19-50mm
857765	XMHFS525	30	S 60ml	25mm
942127	XMHFS529	30	S 60ml	29mm
886711	XMHFS532	30	S 60ml	32mm
930196	XMHFS535	30	S 60ml	35mm
910030	XMHFM519	30	M 110ml	8< 19-50mm
974430	XMHFM522	30	M 110ml	22mm
813148	XMHFM525	30	M 110ml	25mm
963124	XMHFM529	30	M 110ml	29mm
836570	XMHFM532	30	M 110ml	32mm
893333	XMHFM535	30	M 110ml	35mm
933817	XMHFM538	30	M 110ml	38mm
980894	XMHFL519	30	L 200mm	8< 19-50mm
960377	XMHFL525	30	L 200mm	25mm
868708	XMHFL529	30	L 200mm	29mm
928973	XMHFL532	30	L 200mm	32mm
965921	XMHFL535	30	L 200mm	35mm



Small

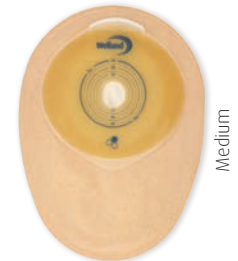

Medium

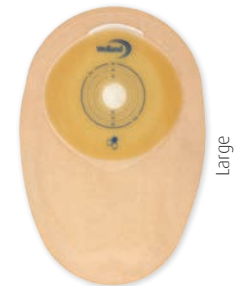

Large

En unik stomipose der både plate og innerpose kan kastes "Rett i do". Hvis ønskelig kan platen separeres fra posen, og kastes rett i avfallet.

Welland klebefjerner spray og servett

Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
968118	WAB050	Welland Klebefjerner spray (50ml)	1
824111	WAD050	Welland Klebefjerner serviett	1



WBF® Barriere spray og servett

Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
823953	WBS050	Welland barrierspray (50ml)	1
902938	WBF050	Welland barriereservietter	50



Produktene bestilles hos din
bandagist eller apotek.

For videre informasjon og spørsmål, kontakt oss på epost:
post@welland.no

Eller gå inn på vår nettside:
welland.no