

**NY  
UTGAVE!**  
01.04.2024

Stomiprodukter fra Welland Norge

**FOR BESTILLING:**

**kundeservice@validusengros.no**

**+47 913 80 080**

Produktene bestilles via bandagist  
eller apotek fra Validus Engros

Welland Medical er en Britisk produsent av stomiprodukter. De ble etablert i 1988, og har kontinuerlig vært innovative og nytenkende i forhold til design og funksjonalitet.

Produktene er helt unike og av høy kvalitet.

Welland Medical har et stort utvalg av stomiprodukter både én-delt og to-delt utstyr.

Aurum<sup>®</sup> Xtra "rett i do-posen" er den eneste av sitt slag i verden. Den er designet for å gjøre poseskiftet raskt, enkelt og hygienisk for brukeren.

Aurum<sup>®</sup>-serien er en nyskapende oppfinnelse, der stomiplatene inneholder Manuka honning fra New Zealand. Manukahonningen har den egenskapen at den er antibakteriell, forebygger og behandler sår hud.

Leverandør av Welland produktene i Norge er Welland Norge, og ble etablert av stomisykepleier/sårsykepleier Brynhild Forbord i 2017.



## **Brynhild Forbord**

Stomisykepleier/sårsykepleier

*Daglig leder, Welland Norge*

Mail: [brynhild@welland.no](mailto:brynhild@welland.no)

Tlf: 932 92 439



## Aurum<sup>®</sup> Xtra

«Rett i do»-pose med Manuka honning.  
Kombinasjon av to revolusjonerende  
oppfinnelser i en og samme pose.  
Spesielt utviklet for å forbedre  
kolostomioperertes livskvalitet.



- **Hudvennlig:** Platen består av Hyperflex<sup>®</sup> hydrocolloid og er tilsatt Manuka honning som kan fremme sunn hud rundt stomien.
- **Manuka honning:** Denne typen aktiv manuka honning har egenskaper som dreper bakterier, forebygger inflammasjoner og stimulerer heling av huden.
- **Frihet:** En praktisk og tidsbesparende løsning ved poseskifte.
- **Spyles ned i toalettet:** Den innerste posen og platen kan spyles ned i toalettet. Biologisk nedbrytbart materiale, som vil brytes ned i kloakksystemet.
- **New Dual-Carb<sup>®</sup>2 filter:** Filteret er nøyaktig kuttet med laser, dette sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.
- **Komfort:** Ytterposen er supermyk og vannavstøtende. Gir ekstra komfort, selv etter langvarig bruk.

**Aurum® Xtra** fjernes raskt og enkelt ved å spyle den innerste posen i toalettet. Se under for fremgangsmåte:

**Steg 1**



Ta av den ytterste posen og kast i avfallet


**Steg 2**



Kast den innerste posen i toalettet

Du kan også velge å separere den innerste posen fra platen. Valget er ditt!

**Steg 1**

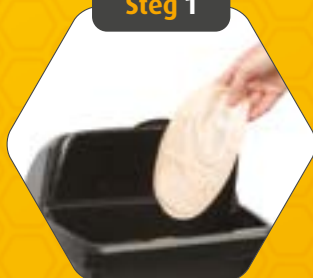

Ta av den ytterste posen og kast i avfallet

**Steg 2**



Kast den innerste posen (uten platen) i toalettet

**Steg 3**



Kast platen i avfallet

Skyll platen ned i toalettet

## Aurum® Xtra "Rett i do" poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
<b>851929</b>	XMHFS519	30	<b>S</b> 60ml	⊗ 19-50mm
<b>857765</b>	XMHFS525	30	<b>S</b> 60ml	25mm
<b>942127</b>	XMHFS529	30	<b>S</b> 60ml	29mm
<b>886711</b>	XMHFS532	30	<b>S</b> 60ml	32mm
<b>930196</b>	XMHFS535	30	<b>S</b> 60ml	35mm
<b>910030</b>	XMHFM519	30	<b>M</b> 110ml	⊗ 19-50mm
<b>813148</b>	XMHFM525	30	<b>M</b> 110ml	25mm
<b>963124</b>	XMHFM529	30	<b>M</b> 110ml	29mm
<b>836570</b>	XMHFM532	30	<b>M</b> 110ml	32mm
<b>893333</b>	XMHFM535	30	<b>M</b> 110ml	35mm
<b>933817</b>	XMHFM538	30	<b>M</b> 110ml	38mm
<b>980894</b>	XMHFL519	30	<b>L</b> 200ml	⊗ 19-50mm
<b>960377</b>	XMHFL525	30	<b>L</b> 200ml	25mm
<b>868708</b>	XMHFL529	30	<b>L</b> 200ml	29mm
<b>928973</b>	XMHFL532	30	<b>L</b> 200ml	32mm
<b>965921</b>	XMHFL535	30	<b>L</b> 200ml	35mm



En unik stomipose der både plate og innerpose kan kastes "Rett i do".  
Hvis ønskelig kan platen separeres fra posen, og kastes rett i avfallet.

## Aurum®

Det 1-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi tilbyr nye og forbedrede funksjoner som bidrar til å forbedre livskvaliteten til stomiopererte.



- Alle platene i Aurum®-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, som kan fremme sunn hud rundt stomien.
- Alle posene har inspeksjonsvindu. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Aurum® stoma cap er ideel for de som irrigerer, har få eller forutsigbare tarm tømminger. Stomi capen kan også brukes over kortere perioder, ved for eksempel under bading, sportsaktiviteter eller under intime situasjoner. Har ikke inspeksjonsvindu.
- Dual-Carb®i filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

## Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.





## Aurum® 1-delt lukkede poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>987101</b>	XMHCS513	30	<b>Mini</b> 195ml	⌀ 13mm (50x70mm)
<b>863678</b>	XMHCM513	30	<b>Midi</b> 295ml	⌀ 13mm (60x80mm)
<b>908876</b>	XMHCM529	30	<b>Midi</b> 295ml	29mm
<b>800885</b>	XMHCM532	30	<b>Midi</b> 295ml	32mm
<b>846066</b>	XMHCM535	30	<b>Midi</b> 295ml	35mm
<b>934062</b>	XMHCM538	30	<b>Midi</b> 295ml	38mm
<b>848950</b>	XMHCL513	30	<b>Maxi</b> 495ml	⌀ 13mm (60x80mm)
<b>981807</b>	XMHCL525	30	<b>Maxi</b> 495ml	25mm
<b>885478</b>	XMHCL535	30	<b>Maxi</b> 495ml	35mm

**Aurum**   
med Manuka Honning



Mini



Midi



Maxi

Aurum® inneholder Manuka Honning og Hyperflex® hydrocolloid som kan forebygge og behandle sår hud.

Dual-Carb® 2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

## Stomi Cap

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
<b>894586</b>	XMHSS513	30	<b>Mini</b> 10ml	13mm (40x50mm)

Stomi Cap er ideelt for de som irrigerer, har få eller forutsigbare tarmtømminger. Stomi capen kan også brukes over kortere perioder, ved for eksempel under bading, sportsaktiviteter eller under intime situasjoner. Har ikke inspeksjons vindu.



Stomi cap



**Aurum® 1-delt tømbare poser**

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>867109</b>	XMHDM513	30	<b>Midi</b> 350ml	⌀ 13mm (60x80mm)
<b>802286</b>	XMHDM525	30	<b>Midi</b> 350ml	25mm
<b>962926</b>	XMHDM529	30	<b>Midi</b> 350ml	29mm
<b>927688</b>	XMHDM532	30	<b>Midi</b> 350ml	32mm
<b>811219</b>	XMHDM535	30	<b>Midi</b> 350ml	35mm
<b>849946</b>	XMHDM538	30	<b>Midi</b> 350ml	38mm
<b>837561</b>	XMHDM544	30	<b>Midi</b> 350ml	44mm
<b>992991</b>	XMHDL513	30	<b>Maxi</b> 555 ml	⌀ 13mm (60x80mm)
<b>837624</b>	XMHDL525	30	<b>Maxi</b> 555 ml	25mm
<b>829427</b>	XMHDL529	30	<b>Maxi</b> 555 ml	29mm



Dual-Carb® i filter for tømbare poser. Karbon struktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer. Enkel å tømme og med integrert lukkesystem

## Aurum® 1-delt urostomipose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
<b>966095</b>	XMHUM513	10	<b>Midi</b> 360ml	∅ 13-55mm
<b>923755</b>	XMHUM525	10	<b>Midi</b> 360ml	25mm
<b>896213</b>	XMHUM529	10	<b>Midi</b> 360ml	29mm
<b>992613</b>	XMHUL513	10	<b>Maxi</b> 485ml	∅ 13-55mm
<b>822582</b>	XMHUL525	10	<b>Maxi</b> 485ml	25mm

Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen. Infeksjonsrisikoen reduseres ved en tilbakeslags-ventil som forhindrer tilbakestrømming av urinen. Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.

**Aurum**   
med Manuka Honning




Midi



Maxi

## Aurum® Convex

Det 1-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi er en god convex løsning for de med retrakterte, skråstilte eller dårlig plasserte stomier.

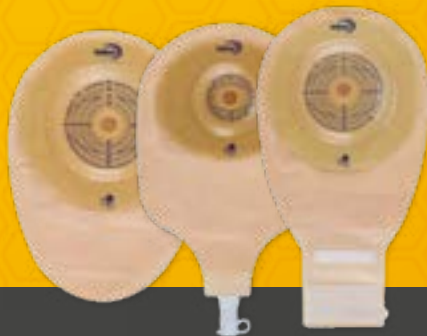

Det convexe platået formes etter kroppstemperaturen, og sikrer en fleksibel passform rundt stomien, slik at stomi nippelen kommer lengre ut fra hud nivået, og forhindrer sjansen for at lekkasjer oppstår. En fin løsning for stomiopererte som opplever sår hud og lekkasjer ved tradisjonelle convexe eller flate plater.

- Platene i Aurum® Convex-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, og har en termoplastisk formbarhet ved kroppsvarme. Alle platene har belteører til stomibelte.
- Alle posene har inspeksjons vindu. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Dual-Carb® i filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

## Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.


Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.




## Hvordan fungerer Aurum® Convex?

**Aurum® Convex** formes av kroppstemperaturen, og en myk og sikker forsegling dannes rundt stomien. Det milde trykket convexiteten gir, fyller hulrommene rundt stomien, og reduserer sjansen for at lekkasjer oppstår.

### Tradisjonell convexitet

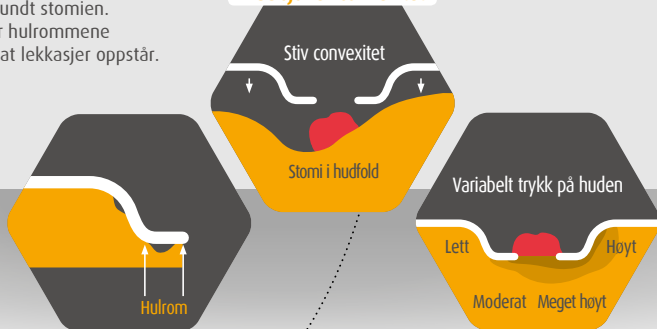

### Aurum® Convexitet

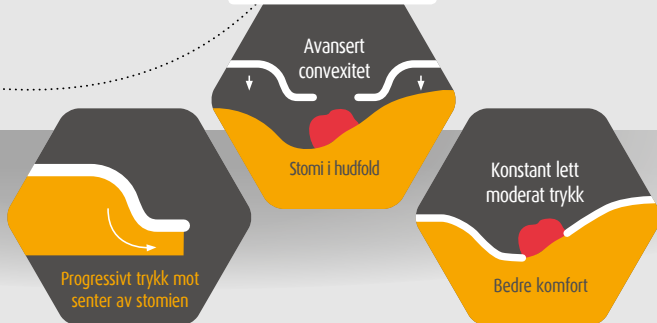

**Aurum® Convex 1-delt lukkede poser**

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>919941</b>	XMHNCS513	10	25 mm	<b>Midi</b> 250ml	⌀ 13-25mm
<b>984431</b>	XMHNCS522	10	25 mm	<b>Midi</b> 250ml	22mm
<b>989888</b>	XMHNCS525	10	25 mm	<b>Midi</b> 250ml	25mm
<b>987221</b>	XMHNCS925	10	25 mm	<b>Maxi</b> 360ml	25mm
<b>825418</b>	XMHNCM513	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	⌀ 13-35mm
<b>829915</b>	XMHNCM529	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	29mm
<b>879723</b>	XMHNCM532	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	32mm
<b>962044</b>	XMHNCM535	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	35mm
<b>889321</b>	XMHNCM935	10	35 mm	<b>Maxi</b> 360ml	35mm



Midi



Maxi

**Aurum® Convex** har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.

## Aurum® Convex 1-delt lukkede poser



Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>809217</b>	XMHNCL513	10	48 mm	Midi 250ml	8< 13-48mm

Dual-Carb® 2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.



Midi Plus

**Aurum® Convex 1-delt tørbare poser**

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>940321</b>	XMHNDS513	10	25 mm	<b>Midi</b> 320ml	8< 13-25mm
<b>846142</b>	XMHNDS519	10	25 mm	<b>Midi</b> 320ml	19mm
<b>986577</b>	XMHNDS522	10	25 mm	<b>Midi</b> 320ml	22mm
<b>824553</b>	XMHNDS525	10	25 mm	<b>Midi</b> 320ml	25mm
<b>960571</b>	XMHNDS913	10	25 mm	<b>Maxi</b> 470ml	8< 13-25mm
<b>987421</b>	XMHNDS922	10	25 mm	<b>Maxi</b> 470ml	22mm
<b>920324</b>	XMHNDS925	10	25 mm	<b>Maxi</b> 470ml	25mm
<b>982507</b>	XMHNDM513	10	35 mm	<b>Midi</b> 320ml	8< 13-35mm
<b>873373</b>	XMHNDM529	10	35 mm	<b>Midi</b> 320ml	29mm
<b>890370</b>	XMHNDM532	10	35 mm	<b>Midi</b> 320ml	32mm
<b>942712</b>	XMHNDM535	10	35 mm	<b>Midi</b> 320ml	35mm
<b>904786</b>	XMHNDM913	10	35 mm	<b>Maxi</b> 470ml	8< 13-35mm
<b>836951</b>	XMHNDM929	10	35 mm	<b>Maxi</b> 470ml	29mm
<b>991723</b>	XMHNDM932	10	35 mm	<b>Maxi</b> 470ml	32mm
<b>994763</b>	XMHNDM935	10	35 mm	<b>Maxi</b> 470ml	35mm



Mini



Midi



Maxi

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.



## Aurum® Convex 1-delt tømbare poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>832200</b>	XMHNDL513	10	48 mm	<b>Midi</b> 320ml	8< 13-48mm
<b>935705</b>	XMHNDL913	10	48 mm	<b>Maxi</b> 470ml	8< 13-48mm
<b>894749</b>	XMHNDX213	10	60 mm	<b>Maxi Plus</b> 470ml	8< 13-60mm

Dual-Carb®i filter for tømbare poser. Karbon struktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer. Enkel å tømme og med integrert lukkesystem

Midi



Maxi



Maxi Plus



## Aurum® Convex 1-delt urostomiposer

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>925747</b>	XMHNUS513	10	25 mm	<b>Midi</b> 360ml	8<13mm - 25mm
<b>877923</b>	XMHNUS519	10	25 mm	<b>Midi</b> 360ml	19mm
<b>803238</b>	XMHNUS522	10	25 mm	<b>Midi</b> 360ml	22mm
<b>964676</b>	XMHNUS525	10	25 mm	<b>Midi</b> 360ml	25mm
<b>829232</b>	XMHNUS913	10	25 mm	<b>Maxi</b> 485ml	8<13mm - 25mm
<b>976171</b>	XMHNUS919	10	25 mm	<b>Maxi</b> 485ml	19mm
<b>989201</b>	XMHNUS922	10	25 mm	<b>Maxi</b> 485ml	22mm
<b>910220</b>	XMHNUS925	10	25 mm	<b>Maxi</b> 485ml	25mm
<b>805161</b>	XMHNUM513	10	35 mm	<b>Midi</b> 360ml	8<13mm - 35mm
<b>974383</b>	XMHNUM913	10	35 mm	<b>Maxi</b> 485ml	8<13mm - 35mm
<b>990476</b>	XMHNUM929	10	35 mm	<b>Maxi</b> 485ml	29mm

**Aurum® Convex** har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier. Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.



Midi



Maxi



## Nattedrenasje - pose med Easiflo™




Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
<b>931962</b>	ND700	2 liter pose for nattedrenasje med Easiflo™ montert. 120 cm slange.	5

Pose for nattedrenasje med Easiflo™ er et unikt system som sikrer fri flyt av urin, mellom urostomiposen og napposen, og forhindrer lekkasjer.

## Aurum® Profile

Det 1-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi er helt unikt og er designet spesielt for de med parastomale brokk, eller annen form for uregelmessigheter rundt stomien.

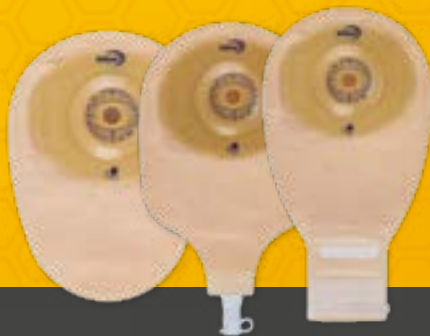

Den har et mykt og formbart platå som føyer seg etter hudfolder, arrvev og fordypninger rundt stomien, og gir en sikker tetning der flate plater ikke passer. Dette kan redusere behovet for pasta og tetningsringer.

- Platene i Aurum® Profile-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, som kan fremme sunn hud rundt stomien. Alle platene har belteører til stomibelte.
- Alle posene har inspeksjonsvindu. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Dual-Carb®1 filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

## Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.



Den  
Fleksible  
Platen



## Aurum® Profile 1-delt lukkede poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
<b>978070</b>	XMHC513	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	⌀ 13-35mm
<b>975179</b>	XMHC532	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	32mm
<b>818931</b>	XMHC535	10	35 mm	<b>Midi</b> 250ml	35mm

<b>824893</b>	XMHCCL513	10	48 mm	<b>Midi</b> 250ml	⌀ 13-48mm
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-----------

<b>929585</b>	XMHCX813	10	60 mm	<b>Midi Plus</b> 250ml	⌀ 13-60mm
---------------	----------	----	-------	---------------------------	-----------

**Aurum** Profile  
med Manuka Honning

**Aurum® Profile** er myk og formbar, og gir en skånsom og fleksibel løsning for de som har parastomale brokk, eller ujevnheter rundt stomien.



Midi



Midi Plus

## Aurum® Profile 1-delt tømbar pose

Helfo nr.	Produktkode	An-tall	Plata-størrelse	Pose-størrelse	Hullstørrelse
<b>970306</b>	XMHCDM513	10	35 mm	<b>Midi</b> 320ml	8< 13-35mm

<b>972551</b>	XMHC DL513	10	48 mm	<b>Midi</b> 320ml	8< 13-48mm
---------------	------------	----	-------	-------------------	------------

<b>941721</b>	XMHC DL913	10	48 mm	<b>Maxi</b> 470ml	8< 13-48mm
---------------	------------	----	-------	-------------------	------------

<b>894454</b>	XMHC DX213	10	60 mm	<b>Maxi Plus</b> 470ml	8< 13-60mm
---------------	------------	----	-------	------------------------	------------

**Aurum** Profile  
med Manuka Honning

**Aurum® Profile** er myk og formbar, og gir en skånsom og fleksibel løsning for de som har parastomale brokk, eller ujevnheter rundt stomien.



Midi



Maxi



Maxi Plus

## Aurum® Profile 1-delt urostomi poser

Helfo nr.	Produktkode	An-tall	Platå-størrelse	Pose-størrelse	Hullstørrelse
<b>862584</b>	XMHCUS522	10	25 mm	<b>Midi</b> 360ml	22mm
<b>976444</b>	XMHCUS913	10	25 mm	<b>Maxi</b> 485ml	⌀ 13-25mm

**Aurum** Profile  
med Manuka Honning

Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen. Infeksjonsrisikoen reduseres ved en tilbakeslagsventil som forhindrer tilbakestrømming av urinen. Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.





## Aurum<sup>®</sup>2

Det 2-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi tilbyr nye og forbedrede funksjoner som bidrar til å forbedre livskvaliteten til stomiopererte.



- Alle platene i Aurum<sup>®</sup>2-serien består av Hyperflex<sup>®</sup> hydrocolloid plate med manuka honning, som kan fremme sunn hud rundt stomien. Alle platene har belteører til stomibelte.
- Easy2peel<sup>™</sup> er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Forbedret sikkerhet med dobbelt sikkerhets system, der posen festes både med ringkobling og kleberkobling.
- Alle posene har inspeksjons vindu, og kan fjernes enkelt fra platen med å ta grep på «plast flippen» øverst på posen. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo<sup>™</sup>-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Dual-Carb<sup>®</sup>i filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb<sup>®</sup>2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

## Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer healing av sår hud.




## Aurum<sup>®</sup>2 2-delt system lukket pose

**Aurum2**   
med Manuka Honning

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Ringstørrelse
<b>997711</b>	XMH2C545	30	<b>Midi</b> 220ml	45mm
<b>813393</b>	XMH2C145	30	<b>Maxi</b> 325ml	45mm
<b>869797</b>	XMH2C555	30	<b>Midi</b> 165ml	55mm
<b>863202</b>	XMH2C155	30	<b>Maxi</b> 280ml	55mm
<b>949790</b>	XMH2C170	10	<b>Maxi</b> 210ml	70mm

Dual-Carb<sup>®</sup>2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

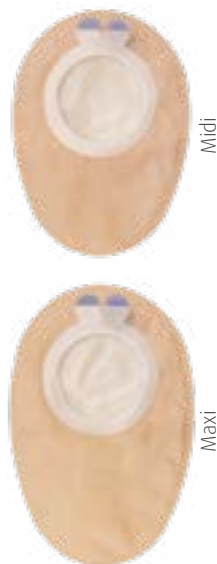

## Aurum<sup>®</sup>2 2-delt system tømbar pose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Ringstørrelse
<b>871823</b>	XMH2D545	30	<b>Midi</b> 250ml	45mm
<b>912655</b>	XMH2D145	30	<b>Maxi</b> 400ml	45mm
<b>827764</b>	XMH2D555	30	<b>Midi</b> 195ml	55mm
<b>957303</b>	XMH2D155	30	<b>Maxi</b> 350ml	55mm
<b>982073</b>	XMH2D170	10	<b>Maxi</b> 290ml	70mm

Dual-Carb<sup>®</sup>i filter for tømbare poser. Karbon struktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.



**Aurum®2 - 2-delt system flate plater**

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Ringstørrelse	Hullstørrelse
<b>942269</b>	XMH2F413	5	45mm	⌀ 13-40mm
<b>801735</b>	XMH2F425	5	45mm	25mm
<b>850935</b>	XMH2F429	5	45mm	29mm
<b>983509</b>	XMH2F432	5	45mm	32mm
<b>926220</b>	XMH2F435	5	45mm	35mm
<b>814673</b>	XMH2F438	5	45mm	38mm
<b>932213</b>	XMH2F513	5	55mm	⌀ 13-50mm
<b>847274</b>	XMH2F538	5	55mm	38mm



Flat plate

**Aurum®2 - 2-delt system convexe plater**

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Ringstørrelse	Hullstørrelse
<b>964425</b>	XMH2NF413	5	45mm	⌀ 13-25mm
<b>834864</b>	XMH2NF419	5	45mm	19mm
<b>810811</b>	XMH2NF422	5	45mm	22mm
<b>971117</b>	XMH2NF513	5	55mm	⌀ 13-35mm
<b>809424</b>	XMH2NF525	5	55mm	25mm
<b>855574</b>	XMH2NF529	5	55mm	29mm
<b>871243</b>	XMH2NF532	5	55mm	32mm
<b>842082</b>	XMH2NF535	5	55mm	35mm
<b>866594</b>	XMH2NF713	5	70mm	⌀ 13-48mm



Convex plate

# Urostomi poser

## Aurum<sup>®</sup>2 2-delt system urostomi pose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Ringstørrelse
<b>804505</b>	XMHZU145	10	<b>Maxi</b> 350ml	45mm
<b>892211</b>	XMHZU155	10	<b>Maxi</b> 300ml	55mm



Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.



# Beskyttelse, pleie og sikkerhet

## Welland Medicals tilbehørsserie





## WBF® Barriere servietter

- Ren silikonbasert oppskrift, uten tilsetningsstoffer eller alkohol.
- Vil ikke svi på rød, øm eller skadet hud.
- Fungerer som en barrierefilm på huden, og tørker i løpet av sekunder.
- Beskytter mot «stripping» av huden, ved gjentatte skifter av stomiplate og evt. tape.
- Praktisk pakningstørrelse som passer inn i en veske, lommebok eller lomme.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
902938	WBF050	Welland barriereservietter	50

## WBF® Barriere Spray

- WBF® barriere sprayen har samme ingredienser som WBF® barriere serviettene, men gir en alternativ påførings metode.
- Påføring uten berøring av huden.

Barriere sprayen har en "Bag-in-can" teknologi

- Ingen brennbare drivgasser, og mindre behov for konserveringsmidler.
- Ingen kuldefølelse når sprayen påføres.
- Jevn og kontrollert påføring.
- 100% av produktet tømmes fra flasken, og ingenting går til spille.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
823953	WBS050	Welland barrierespray (50ml)	1

## Stomipasta

- Stomipastaen gir en god tetning for å forhindre lekkasjer og sår hud. Den fyller hudfordypninger og hudskader.
- Uten alkohol, og svir ikke ved påføring.
- Enkel å påføre direkte fra tuben, og pastaen forblir holdbar og fleksibel gjennom hele brukstiden.
- Hypoallergenisk, og passer de fleste hudtyper



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
853391	WSP100	Welland stomipasta (100g)	1

## Stomipulver

- Danner et beskyttende lag på fuktig og skadet hud. Hindrer ytterligere skade og fremmer tilheling av huden.
- Inneholder aloe vera og naturlige og hudvennlige ingredienser.
- Bidrar til å sikre at stomiplaten fester på fuktige områder.
- Påføringen kan skje på to måter. Punktvis eller i striper på fuktige områder, eller «puffes» som en sky, for å nå vanskelig tilgjengelige områder.
- Flasken er gjennomsiktig, så du lett kan se nivået av pulver.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
967364	WPP025	Welland stomipulver m/aloe vera (25g)	1

## HydroFrame® plateforlengere med Manuka Honning

- Hydroframe® plateforlenger med manuka honning gir ekstra komfort, sikkerhet og trygghet, når det trengs.
- Hydroframe® plateforlengere 14cm og Hydroframe® mini 8cm.
- Plateforlengerne er tynne, fleksible og inneholder hydrokolloid og manuka honning.
- De er designet for å fungere på alle typer poser og stomiprodukter.
- Gir ekstra klebeffekt, og kan redusere risikoen for lekkasjer, selv ved langvarig bruk.
- «Flipper» i hver ende av plateforlengerne, som forenkler påføringen, selv hos de med begrenset fingermotorikk.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
967811	XMHWAFH33	HydroFrame plateforlenger med manukahonning (14 cm)	20
884166	XMHWAFM33	HydroFrame plateforlenger med manukahonning (8 cm)	30

## Hyperseal® tetningsringer med Manuka Honning

- Hyperflex® hydrokolloid og Manuka Honning kan fremme tilheling av sår og irritert hud.
- Ideel ved sprekkdannelser, fistler og hudskader rundt stomien.
- Tetningsringene former seg etter hudens konturer, noe som gir ekstra komfort og sikkerhet mot lekkasjer, selv under langvarig bruk.
- Tetningsringene kan deles og formes etter eget ønske.
- Gunstig i bruk rundt dren.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
880601	XMHWA300	Tetningsring med manukahonning (50 mm) 2.5 mm tykk	20
991445	XMHWA350	Tetningsring med manukahonning (100 mm) 2.5 mm tykk	5

## Welland kleberfjerner spray

- Welland kleberfjerner spray er silikonbasert og fjerner skånsomt limrester på huden.
- Alkoholfri og mild mot sensitiv hud.
- Den gir et raskt, smertefritt og enkelt plateskifte.
- Bidrar til å redusere skader ved gjentatte plateskifte og fjerning av lim.
- Tørker på sekunder, og gir derfor ingen problemer for neste plateskifte.
- Welland kleberfjerner sprayen har samme «Bag-in-can» teknologi som barriere sprayen.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
968118	WAB050	Welland Kleberfjerner spray (50ml)	1

## Welland klebefjerner serviett

- Meget fuktig og effektiv klebefjerner serviett.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
824111	WAD050	Welland Klebefjerner serviett	1

## Stomibelte

### For ekstra trygghet

- Myk, behagelig og justerbart belte med borrelås. Perfekt for bruk under fysisk aktivitet.
- Beltet kan brukes sammen med Wellands 1-delt og 2-delt utstyr.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antall
925175	XBLTL01	Belte Large	145cm	1
973934	XBLTS01	Belte Medium	120cm	1

## Welland Stomi-saks



Art. nr.	Produktbeskrivelse
233203	Welland Stomi-saks