

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier og sopp, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.



**NY
UTGAVE!**
01.03.2025

**Til deg som bruker
stomiprodukter med
manuka honning**

TIPS & PRODUKTINFORMASJON

Varm platen godt før bruk

Da våre plater ikke inneholder syntetisk lim, men består kun av naturlige og hudvennlige stoffer. Klebefunksjonen er blandet i hele hudplaten og det er derfor lurt å du varmer den godt, og masserer godt rundt stomien, når platen er satt på. Dette gjør at klebeegenskapene kommer godt frem. Alle platene, tetningsringene og plateforlengerne i Aurum serien består av Hyperflex® Hydrocolloid med manuka honning fra New Zealand.

Når platen settes på, er det lurt å kontrollere i inspeksjonsvinduet om platen sitter korrekt. Vurder alltid skiftefrekvensen på platene, da behovet for skifting varierer fra person til person. Bruk rikelig med lunkent vann ved rengjøring av huden. Gjerne dusje! Sett platen på tørr og ren hud, uten barrierefilmer eller kremer. Da vil manukahonningen fungere på huden.

Svie

Ved meget sår hud vil noen kunne oppleve svie på huden de første gangene platen blir satt på. Dette går over etter noen minutter, og er et tegn på at manukahonningen har startet prosessen med å behandle huden din.


Veske fra sår og irritert hud

De første dagene etter at du har startet med Aurum produktene vil noen opp-

leve at det kan veske fra huden. Dette er en helt normal reaksjon og betyr at behandlingen fungerer. Det er fornuftig å alltid være i forkant med gode skiftefrekvenser, for å forebygge lekkasjer til huden er leget.


Kontroller hullstørrelse

Kontroller med jevne mellomrom at hullstørrelsen på platen er riktig. Størrelsen på stomien kan endre seg spesielt de første månedene etter operasjonen, men også ved vektøkning eller vektreduksjon. Bruk da måleskjemaet som ligger i lokket på eskene.

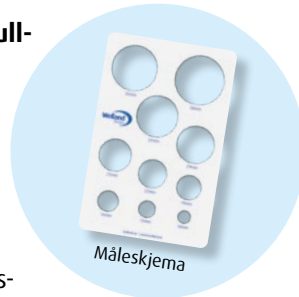

Når du skal ta av platen

Det er et felt øverst på platen med litt mindre klebefunksjon. Da kan du enkelt og skånsomt fjerne platen med Welland klebefjerner. Dette feltet kaller vi Easy2peel™.

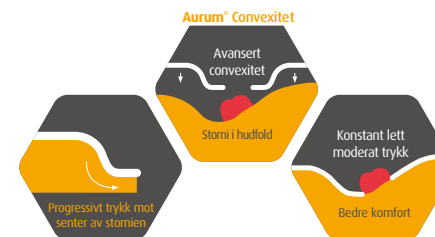

Aurum®

1-delt system som gjennom sin smidige plate vil gi stor fleksibilitet.

Aurum® Xtra «rett i do posen»

En unik stomipose som kan kastes i do. For deg som har en colostomi, og kan bruke flat plate.

Ta først av den ytterste plastbelagte posen, denne kastes i avfallet. Ta deretter av den innerste posen og platen, disse spyles ned i toalettet. Platen kan også separeres fra innerposen og kastes i avfallet hvis ønskelig, men begge består av biologisk materiale som brytes ned i kloakksystemet.

Aurum® Convex

1-delt system for deg med lav, skråstilt eller en utfordrende plassert stomi. Egner seg meget godt til de som har fordypninger eller hudfolder rundt stomien. Det convexe platået formes av kroppstemperaturen, og gir en myk og sikker forsegling. Det milde trykket som den myke convexiteten gir, gjør at platen legger seg i hulrom rundt stomien, og reduserer sjansen for at lekkasjer oppstår.



Den
Fleksible
Platen

Aurum® Profile

1-delt system for deg med parastomalt brokk, stort bukomfang, eller annen form for uregelmessigheter rundt stomien. Platen vil forme seg etter ujevnheter i huden.

Ved valg av riktig platå på platen, mål diameteren fra sentrum av stomien, og ut til begge sider. For kontroll av platåstørrelsen, kan et godt tips være å bruke plastfilmen på baksiden av platen som en mal.



Aurum® Plus

1.delt system. Sorte poser, og plate designet for bedre komfort og fleksibilitet.



Aurum® Plus Soft Convex

Har en myk convexitet med 6mm dybde. Platen er designet for komfort, fleksibilitet og sikkerhet.



Flat plate



Convex plate



Aurum® 2

2-delt system med dobbel sikring, der posen festes med en myk ringkobling og en kleberkobling. Dette gir en trygg kobling som sikrer at posen er satt på riktig.

Alle Aurum2® stomiposene finnes i colo, ileo og uroposer.



Stomibelte

Alle convexe produkter og todelt plate, har belteører, og kan bruke stomibelte. Mange kan oppleve en trygghet ved å bruke et stomibelte den første tiden etter at utstyret er satt på. Beltene er myke og med borrelås. Finnes i lengdene 120 cm og 145 cm.



Med
Manuka
Honning



Hyperseal® tetningsringer

Hyperseal tetningsring med manuka-honning finnes i 50mm og 100mm. Med en tykkelse på 2.5mm. Begge ringene kan deles, og formes etter eget ønske. Fest ringen på huden, og ikke på stomi-platen, da ringen føyer seg inn i konturene på huden, ved god oppvarming og kroppsvarme.

Med
Manuka
Honning



Hydroframe® plateforlengere

Gir ekstra trygghet når det trengs. Finnes i størrelsene 14 og 8 cm. Varm plateforlengerne godt, og fjern alltid den midtre delen av papiret på baksiden først. Sett den på huden, og fjern resten av papiret.



Welland stomipasta

Hypoallergenisk og uten alkohol. Inneholder karaya gummi, som er meget hudvennlig. Pastaen inneholder også fiberhusk, som gir den egenskapen at pastaen sveller.



Welland kleberfjerner spray og servietter

Tørker på sekunder, og gir et raskt, smertefritt og enkelt plateskifte.



WBF® barriere serviett og WBF® barriere spray

Legger seg ikke lagvis på huden, men kan lett vaskes bort ved hvert skifte. Fin å bruke ved fet eller fuktig hud for bedre feste av platen. Ved mye sårhet i huden brukes kun produktene med manukahonning, og rikelig med vann til rengjøring. Da barriereprodukter kan hindre manukahonningen i å virke på huden.



Produktene bestilles hos din
bandagist eller apotek.

For videre informasjon og spørsmål, kontakt oss på epost:
post@welland.no

Eller gå inn på vår nettside:
welland.no

